

Secuencia Quirúrgica

Implantes Híbridos

Fresa	2,2	2,8	3,4	3,8	4,6	4,8
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

r.p.m. 600 - 1.200

Ø Implante

3,3	✓	(B-N-D)				
3,75	✓	(B)	(N-D)			
4,0	✓	(B)	*	(N-D)		
4,8	✓	✓	*	(B)	(N-D)	
5,0	✓	✓	*	(B)	*	(N-D)

(B) = Blando (N) = Normal (D) = Denso



Importante: durante toda la preparación quirúrgica se debe considerar la opción de usar Fresas para Hueso Denso, independientemente del tipo de Implante y de la densidad ósea, con el objetivo de no superar los 50 Ncm de torque. La remoción de hueso cortical denso con Fresas para Hueso Denso siempre debe hacerse con rotación lenta (15 – 50 r.p.m. | Máximo). Las Fresas para Hueso Denso pueden usarse también para preparar gradualmente los lechos quirúrgicos (p. ej., ensanchamiento de la zona cortical y sitios de post extracción).

(!) La Fresa Redonda y la Fresa Lanza son opcionales.

* Opcional.



Developed By P-I Brånemark



Lea las Instrucciones de Uso antes de colocar los productos.

SIC[®] A COMPANY OF
SIC invent Group